

Verpleeggroep systeem



oproep- / afstelunit

Naast onze IP kamerunit met geïntegreerde verpleeggroep, zijn er ook diverse separate oproep- / afstelunits welke op de kamerunits kunnen worden aangesloten. De units zijn leverbaar met of zonder aansluiting voor een peerdrukker of trek-schakelaar.

De units verkrijgbaar met één of twee toetsen met functiegebonden kleuren zijn allen voorzien van subtiele LED indicatieverlichting, welke kan worden ingesteld voor de niet actieve status en de actieve status. Tevens bestaat de mogelijkheid een bevestigingstoon van de gemaakte oproep in te stellen. De volgende versies zijn beschikbaar:

Unit met rode en groene knop



Deze unit met volledig verpleegroepprotocol wordt rechtstreeks op de IP kamerunit aangesloten. De rode knop dient voor de oproep en als de verpleging/verzorging aanwezig is, voor de assistentieroep. Met de groene knop geeft men aan dat de verpleging/verzorging aanwezig is en kan men de

oproep afstellen. Zodra de verpleegkundige via de groene knop de melding "verpleging/verzorging aanwezig" maakt, verschijnt deze melding op het ANC zorgcommunicatie systeem en wordt de spreek/luister en eventuele video verbinding direct uitgeschakeld. Dit om de privacy van zowel cliënt als verplegend personeel te waarborgen. Na het indrukken van de assistentieroep, is de communicatie met de centrale wel weer mogelijk.

Unit met enkel een rode knop



Deze dient uitsluitend voor het maken van een oproep. Dit kan zijn als bijvoorbeeld tweede oproepmogelijkheid of deze kan worden gebruikt in situaties waar men geen verpleegroep protocol gebruikt.


Unit met alleen een groene knop



Deze unit leent zich uitstekend om bijvoorbeeld bij de deur te worden geplaatst waarbij de groene knop de melding "verpleegkundige aanwezig" maakt. Ook hier wordt zodra de knop wordt

ingedrukt een melding gemaakt naar het ANC zorgcommunicatiesysteem en wordt de spreek/luister verbinding uitgeschakeld.

Unit met trekkoord

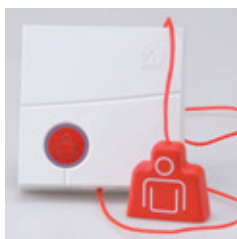

De drie bovenstaande versies zijn tevens beschikbaar met een trekkoord. Deze zijn speciaal geschikt voor MIVA toiletten, badkamers en overige natte ruimtes.

Peerdrukker



Alle versies kunnen bovendien voorzien worden van een aansluiting t.b.v. een peerdrukker. Deze aansluiting is voorzien van een trekontlasting met een "sabotage" melding.

Technische specificaties oproep- / afstel unit

Voeding	Via IP kamerunit
Voedingsspanning	5V
Opgenomen vermogen	1W
Keuringen	EN55022, EN50130-4, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN60950
Afmetingen b x h x d	91mm x 91mm x 27mm
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (ABS)
Kleur behuizing	RAL9016 verkeerswit
Beschermingsklasse	IP30
Opbouw montage	M.b.v. 2 schroeven of enkele U50 inbouw doos
Drukknoppen	Silicone drukknooppn met instelbare achtergrondverlichting
Kleur drukknooppn	RAL3003 robijnrood, RAL6001 smaragdgroen



De Heer Medicom
Mens | Zorg | Veiligheid

t +31 (0)46 489 25 50
f +31 (0)46 489 25 75
e info@deheermedicom.nl
i www.deheermedicom.nl